

**INSTRUÇÕES DE USO
TUBIFAST® GARMENTS**

Nome técnico: Bandagem

Nome comercial: Tubifast® Garments

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Não utilizar se a embalagem estiver danificada”

“Utilização individual, múltiplos usos”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

O produto é acondicionado em cartuchos nas seguintes dimensões:

Código do Produto	Descrição	Tamanho
992007	Tubifast® Veste	6-24 meses
992008	Tubifast® Veste	2-5 anos
992009	Tubifast® Veste	5-8 anos
992010	Tubifast® Veste	8-11 anos
992011	Tubifast® Veste	11-14 anos
992012	Tubifast® Legging	6-24 meses
992013	Tubifast® Legging	2-5 anos

Código do Produto	Descrição	Tamanho
992014	Tubifast® Legging	5-8 anos
992015	Tubifast® Legging	8-11 anos
992016	Tubifast® Legging	11-14 anos
992017	Tubifast® Meias	Único

Código	Descrição	Tamanho	Tamanho da palma (cm)	Tamanho total (cm)*
5920	Tubifast Luvas	M/G Adulto	5.7 – 6.7	18.5 – 22.5
5921	Tubifast Luvas	P/M Adulto - M/G Infantil	5.0 – 6.0	16.5 – 19.5
5922	Tubifast Luvas	XP Infantil	4.3 – 5.3	12.0 – 15.0
5923	Tubifast Luvas	P Infantil	4.8 – 5.8	15.3 -18.3

*tamanho do punho até a ponta do dedo médio

Quantidade: 1 unidade por cartucho.

DESCRIÇÃO E MODO DE AÇÃO

Tubifast® Garments possui 2-Way Stretch Technology e é composto de fibras de viscose, nylon e elastano para fornecer uma leve elasticidade.

O produto mantém/retém os curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, ajudando na prevenção de maceração.

Tubifast® Garments são roupas leves: luvas, vestes, meias e leggings em uma variedade de tamanhos (veja as tabelas acima). Tubifast® Garments são construídos com painéis tubulares de malha elástica de duas vias, unidas com costuras planas e destinam-se à utilização individual, múltiplos usos. Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não sejam sujos com fluidos corporais.

INDICAÇÃO DE USO

O Tubifast® Garments é indicado para manter/reter curativos no lugar, como parte da técnica de enfaixamento (seca e úmida).


COMPOSIÇÃO

Fibras feitas em viscose, nylon (poliamida) e elastano.

INSTRUÇÕES DE USO

Recomenda-se que o Tubifast® Garments seja utilizado de acordo com as dimensões e com a idade, conforme tabela abaixo.

Utilização individual, múltiplos usos.

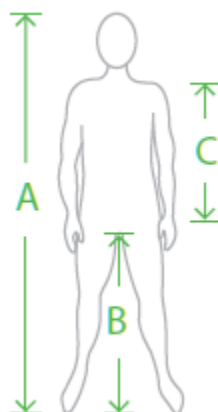

	A	B	C
6-24 meses	74 – 86 cm	28 – 34 cm	25 – 29,5 cm
2-5 anos	86 – 110 cm	34 - 47 cm	29,5 – 35,5 cm
5-8 anos	110 – 128 cm	47 – 58 cm	35,5 – 42 cm
8-11 anos	128 – 146 cm	58 – 68 cm	42 – 49 cm
11-14 anos	146 – 164 cm	68 – 77 cm	49- 57,5 cm

Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não tenham sido sujos com fluidos corporais.



Máxima temperatura de lavagem de 60°C. Secagem em tambor rotativo é permitida em temperatura mínima. Não utilizar alvejante. Não passar a ferro. Não limpar a seco.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Mantenha limpo.
- Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente quando utilizado juntamente com produtos à base de parafina.
- Em caso de sujidades no Tubifast® Garments devido a fluidos corporais, descarte-o adequadamente e faça a devida substituição.
- Em casos de piora das condições, interrompa o uso e procure orientação médica.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao uso do Tubifast® Garments, este deve ser reportado a Molnlycke Health Care.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em condições secas e temperatura até 35°C.

DESCARTE

O descarte deve ser feito em acordo com os procedimentos ambientais locais.

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80733280026

E-MAIL: tecnovigilanciabr@molnlycke.com.br

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP

CEP: 06696-060

CNPJ: 12.600.168/0001-17

FABRICANTE LEGAL:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 – Suécia

Fabricado no Reino Unido.