

Cuide de cicatrizes com

Mepiform®

O curativo de última geração
para prevenção e tratamento de
queloide e cicatriz hipertrófica!



DESCUBRA TUDO SOBRE ESSA INCRÍVEL SOLUÇÃO!



A fase final da cicatrização de uma ferida nem sempre marca o encerramento do cuidado com o paciente. Muito pelo contrário, ela pode significar o início de uma nova etapa: **o manejo da cicatriz.**

Isso porque cicatrizes, se não cuidadas, podem evoluir para formas patológicas, como queloides ou hipertróficas,



causando perda de funcionalidade da pele, dor, coceira e até mesmo limitação de movimento. Além disso, elas podem ser responsáveis por problemas de autoestima, afetando a vida social do paciente e, portanto, **devem ser devidamente tratadas.**

Entendendo as cicatrizes

Evidências mostram que a formação de cicatrizes é complexa, com diversos tipos de células, citocinas e outros fatores envolvidos em um processo que, geralmente, se dá durante a cura de uma ferida.

De forma geral, podemos dizer que o acúmulo de colágeno no local em que o tecido está danificado, poderá formar uma cicatriz elevada e/ou grossa e vermelha. Com o passar do tempo, essas cicatrizes devem se tornar mais suaves e macias, e desbotar de forma que sua cor se assemelhe ao restante da pele.

Contudo, algumas cicatrizes evoluem para formas patológicas, permanecendo grossas, largas, vermelhas e elevadas. Estas são conhecidas como cicatrizes hipertróficas ou queloides, e precisam ser tratadas devidamente para evitar desconfortos ao paciente.

Caracterizada por uma aparência elevada sobre a ferida original, acompanhada de vermelhidão, inchaço e coceira.

Hipertrófica

Com características similares à Hipertrófica, esse tipo de cicatriz ultrapassa os limites da ferida original e continua a crescer.

Queloides

REFERÊNCIAS:

1. Monstrey, S., Middelkoop, E., Vranckx, J..J., et al. Updated Scar Management Practical Guidelines: Non-invasive and invasive measures. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 2014; 67:1017-1025.
2. Téot, L., Mustoe, T.A., Middelkoop, E., Gauglitz, G.G. Textbook on Scar Management. State of the Art Management and Emerging Technologies. Springer. 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44766-3>.

Cada cicatriz é única

Durante o tratamento de uma cicatriz, é importante lembrar que a extensão do problema não é definida apenas pelo local, tipo e gravidade da lesão da qual ela se formou, mas também por fatores intrínsecos ao paciente como idade, gênero e cor da pele.

Portanto, se a cicatriz é única, o tratamento também deve ser, considerando as particularidades de cada paciente, como seu histórico clínico, predisposição genética, tipo de pele e resposta individual ao processo de cicatrização.

Esse olhar individualizado é fundamental para promover melhores resultados estéticos e funcionais, além de garantir mais conforto e bem-estar ao paciente.

Mepiform® é a escolha ideal

para apoiar um tratamento completo,
individualizado e eficaz de cicatrizes!

Mepiform® é uma cobertura à base de silicone suave, desenvolvida especialmente para a prevenção e tratamento de cicatrizes hipertróficas e queloides, capaz de contribuir para diminuir o relevo, suavizar a pele e reduzir a vermelhidão.

Com camada de contato Safetac®, que adere gentilmente à **pele**, Mepiform® se adapta aos contornos do corpo e permite que o paciente se movimente de forma confortável, independentemente do local da aplicação.

Essa solução também **pode ser retirada e reaplicada para inspeção da cicatriz, podendo ser utilizada por até 7 dias**. Fácil de remover, Mepiform® é gentil e não causa danos à pele já frágil da cicatriz.



Por que usar Mepiform®?



Flexível e se adapta bem aos contornos do corpo.



Adere bem, sem necessidade de fixação secundária.



É suave para a pele frágil e fácil de remover.



Protege a pele da luz solar e dos raios UV.



Pode ser recortado de acordo com a necessidade.



É resistente à água.

Como usar Mepiform®?

- 1 Mepiform® deve ser aplicado após a ferida ter cicatrizado completamente.
- 2 Se necessário, corte Mepiform® no formato e tamanho desejados.
- 3 Aplique sobre a cicatriz, cobrindo toda a área de tratamento e deixando uma margem de pelo menos 1cm.
- 4 Ao aplicar Mepiform®, certifique-se de que a área esteja seca.



Sempre lembre-se de:

- Ressaltar que o paciente deve utilizar Mepiform® 24 horas durante o período de tratamento.
- Orientar o paciente a remover parcialmente Mepiform® uma vez ao dia para inspecionar a lesão e reaplicá-lo logo em seguida.
- Explicar ao paciente que o tempo de tratamento irá variar de acordo com as particularidades da cicatriz, podendo variar de algumas semanas a diversos meses.

Perguntas frequentes sobre Mepiform®?

Tirar as dúvidas de seus pacientes pode ajudar a garantir uma maior adesão ao tratamento!

Em quais tipos de cicatrizes Mepiform® pode ser utilizado?

Essa solução é destinada ao tratamento de cicatrizes novas e antigas, hipertróficas e queloides. Também pode ser usada em feridas fechadas para prevenção de cicatrizes patológicas.

Mepiform® pode ser aplicado em qualquer lugar do corpo?

Sim, ele pode ser usado em qualquer parte do corpo e pode ser recortado em qualquer formato.

Mepiform® dói ao ser removido?

Não. Essa solução possui a tecnologia exclusiva Safetac®, que se trata de uma camada de contato de silicone que adere gentilmente aos contornos da pele. Portanto, mesmo com sua boa aderência, ainda é suave para os tecidos, e pode ser removido e reaplicado sem perder suas propriedades adesivas.

É necessário usar Mepiform® todos os dias?

Sim. Para garantir os melhores resultados, essa solução deve ser usada diariamente, 24 horas (inclusive durante o banho), retirando-a apenas no momento de inspecionar a pele e a reaplicando logo em seguida.

Quanto tempo demora para a cicatriz se tornar menos visível?

A duração dos cuidados com a cicatriz varia de pessoa para pessoa, assim como os resultados obtidos podem depender da idade, tamanho, forma cicatriz e outras terapias associadas.

Mepiform® pode ser usado em crianças?

Sim. Com indicação adequada de um profissional de saúde, crianças podem usar Mepiform® para cuidados diários com cicatrizes.



Compartilhe esse conteúdo e ajude a aumentar a conscientização sobre a importância do tratamento de cicatrizes.