

INSTRUÇÕES DE USO

TUBIFAST® COM 2-WAY STRETCH

Nome técnico: Bandagem

Nome comercial: Tubifast® com 2-Way Stretch

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico não estéril”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Modelo Comercial	Tipo de produto	Tamanho nominal (cm x m)	Variação Largura em repouso(cm)	Variação Largura esticada (cm)	Variação Comprimento (m)
2434	Tubifast® com 2-Way Stretch - Vermelho	3,5 x 10	3 – 4,5	14 – 18	10 – 10,6
2436	Tubifast® com 2-Way Stretch - Verde	5 x 10	5,0 – 6,5	19,5 – 24,5	10 – 10,6

2438	Tubifast® com 2-Way Stretch – Azul	7,5 x 10	7,5 – 9,5	30 - 36	10 – 10,6
2440	Tubifast® com 2-Way Stretch – Amarelo	10,75 x 10	12 – 13,5	41 - 49	10 – 10,6
2444	Tubifast® com 2-Way Stretch – Roxo	20 x 10	19 - 23	76 - 86	10 – 10,6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E MODO DE AÇÃO

O produto mantém curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, ajudando na prevenção de maceração.

COMPOSIÇÃO:

Tubifast® com 2-Way Stretch é composto por viscose, elastano e nylon (poliamida).

INDICAÇÃO DE USO

Tubifast® com 2-Way Stretch é uma bandagem de malha lisa, indicado para manter/reter curativos no lugar em qualquer parte do corpo como parte da técnica de enfaixamento (seca e úmida) e como uma malha tubular.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast® e cortar o comprimento, se necessário.
2. Abra a bandagem e estique sobre a área afetada.

Utilização individual. Múltiplos usos.

Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não tenham sido sujos com fluidos corporais.



Máxima temperatura de lavagem 60°C. Secagem em tambor rotativo é permitida em temperatura mínima. Não utilizar alvejante. Não passar a ferro. Não limpar a seco.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Mantenha limpo.
- Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente quando utilizado juntamente com produtos à base de parafina.
- Em caso de sujidades no Tubifast® devido a fluidos corporais, descarte-o adequadamente e faça a devida substituição.
- Em casos de piora das condições, interrompa o uso e procure orientação médica.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao uso do Tubifast®, este deve ser reportado a Mölnlycke Health Care.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em condições secas e temperatura entre 0° e 35°C.

Transportar o produto em sua embalagem original.

DESCARTE

O descarte deverá atender aos procedimentos ambientais locais.

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80733280009

E-MAIL: tecnovigilanciabr@molnlycke.com.br

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Caio Cotrim, 1100 – Parte C-26 – Itapevi, SP

CEP: 06696-060

CNPJ: 12.600.168/0001-17

FABRICANTE LEGAL:

Mölnlycke Health Care AB, Entreprenörsstråket 21, SE-431 53, Mölndal, Suécia

Fabricado no Reino Unido.